

CROWN FLEX®

СТЕРИЛЬНІ В'ЯЗКОПРУЖНІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОСУГЛБОВИХ ІН'ЕКЦІЙ

CrownFlex® Являє собою стерильні, непірогенні в'язко-пружні розчини, що містять високоякісний гіалуронат натрію, отриманий шляхом біо-ферментації.

CrownFlex® Застосовується у хворих з дегенеративними захворюваннями суглобів (остеоартритом) що дозволяє зменшити механічні навантаження на суглоб і збільшити їх рухливість. Завдяки надійному змащенню та амортизації.


CrownFlex® пропонується з 4 різними концентраціями

- **CrownFlex®** 20 mg 1.0%
- **CrownFlex®** 32 mg 1.6%
- **CrownFlex®** 40 mg 2.0%
- **CrownFlex®** 60 mg 3.0%




Гіалуронат натрію знаходиться в організмі людини, а також у тварин та бактерій. У людських суглобах Na-гіалуронат – товста, слизька рідина, яка допомагає подушці, змащувати і захищати кістки та суглобні тканини.

У хворих з остеоартритом суглоба Na-гіалуронат з часом стає тоншим і стає менш здатним забезпечити захист.

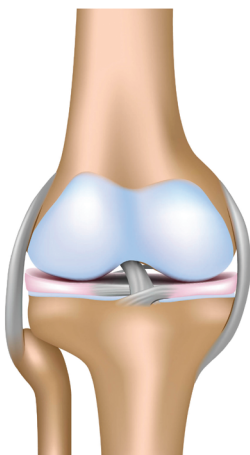

Здоровий колінний суглоб

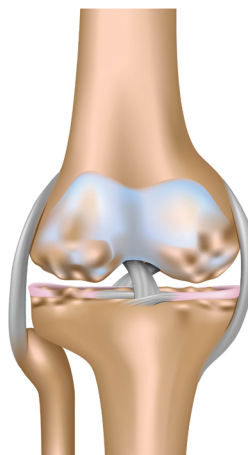

Остеоартрит

ТЕХНІЧНІ ДАННІ

	CrownFlex® 20 mg	CrownFlex® 32 mg	CrownFlex® 40 mg	CrownFlex® 60 mg
Гіалуронат натрію	1.0%	1.6%	2.0%	3.0%
Молекулярна вага	1.1 - 2.6 мільйон далтонів	1.1 - 2.6 мільйон далтонів	1.1 - 2.6 мільйон далтонів	1.1 - 2.6 мільйон далтонів
В'язкість	20 - 60.000 mPa.s	80 - 140.000 mPa.s	90 - 150.000 mPa.s	150 - 250.000 mPa.s
Осмоляльність	270 - 400 mOsm/kg	270 - 400 mOsm/kg	270 - 400 mOsm/kg	270 - 400 mOsm/kg
Умови зберігання	2-25 °C	2-25 °C	2-25 °C	2-25 °C
pH	6.8 - 7.6	6.8 - 7.6	6.8 - 7.6	6.8 - 7.6
Спосіб отримання	Біоферментація	Біоферментація	Біоферментація	Біоферментація
Об'єм	2.0 mL	2.0 mL	2.0 mL	2.0 mL

СКЛАД (2ML)

	CrownFlex® 20 mg	CrownFlex® 32 mg	CrownFlex® 40 mg	CrownFlex® 60 mg
Гіалуронат натрію	20.000 mg	32.000 mg	40.000 mg	60.000 mg
Хлористий натрій	17.000 mg	17.000 mg	17.000 mg	17.000 mg
Динатрієвий водень фосфат	1.126 mg	1.126 mg	1.126 mg	1.126 mg
Дигідрофосфат натрію	0.090 mg	0.090 mg	0.090 mg	0.090 mg
Вода для ін'єкцій	q.s	q.s	q.s	q.s




CrownFlex® використовується для полегшення остеоартриту суглобів у людей, які не отримують достатнього ефекту від знеболюючих препаратів або від фізичних вправ.

Коли **CrownFlex®** вводиться в суглоб, він поповнює втрачений Na-гіфлуронат та забезпечує зменшення болю.

Виробник:



Офіційний представник в Україні:

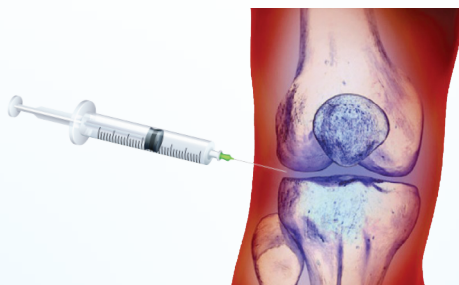

тел.: +38 093 377 08 91
+38 097 696 05 99

www.vismight.com.ua

Сертифікат відповідності №004/1/17/MD